

パンチ中心

パンチ中心

簡易フェイスシールド

A-MASK

エーマスク




①



②



③

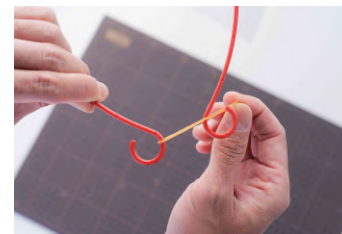


④




⑤

- ① クリアファイルをカッターを使用して半分にしてください。(ラミネートフィルムの場合は必要ありません)
- ② 本台紙とクリアファイルを重ね、ペンで印をつけパンチで穴をあけてください。(パンチは JIS 規格を使用)
- ③ 本製品の突起をクリアファイルの穴にひっかけてください。
- ④ 本製品に輪ゴムをかけてください。
- ⑤ 完成です。装着してください。

※本製品を台所用漂白剤につけ置きすることで、より衛生的に使用して頂くことが可能です。

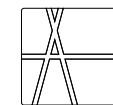

AnjoHearts
PROJECT

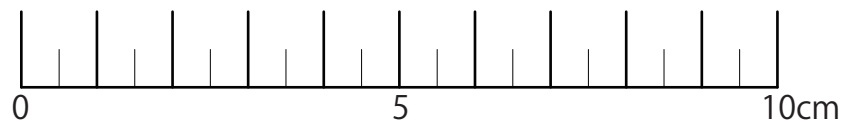

プリンターの設定に注意してください。
左の定規で印刷サイズを確認してください。

doyo model(3DVerkstan を改変) CC-BY-SA

